


低・中周波施術機器「TEPORA（テポラ）」

取扱説明書

これから TEPORA（テポラ）を始める、あなたへ。

この度は、「TEPORA（テポラ）」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上の注意事項」をよく読み、TEPORA の機能をご理解いただくためにも、こちらの取扱説明書に記載の「使い方説明」「使い方動画」をご確認ください。取扱説明書は必要な時にすぐ確認することができるよう、手元に置いてください。

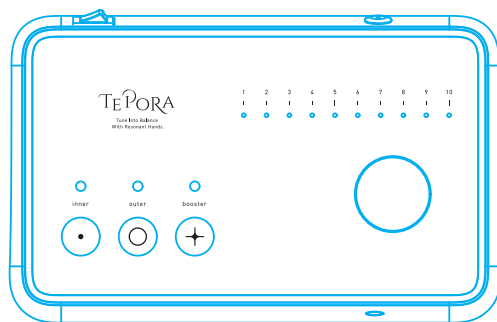

- ・ 安全上の注意事項
- ・ 商品同梱物、操作パネル各部名称
- ・ TEPORA（テポラ）の使い方
- ・ お手入れ方法、その他
- ・ 製品仕様
- ・ 保証書

本機器には、製品保証書が付属しています。





所定事項に記入及び記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。



保証期間は、ご購入日より1年間になります。



安全上の注意



- 本機器は業務用美容機器です。個人向けのホームケア用ではありませんので取り扱いには十分にご注意ください。
- 本機器は、医療効果や病気、疾患の治療を目的としてはご使用いただけません。
- 本機器は安全に十分配慮して設計されていますが、電気製品はすべてにおいて間違った使い方をするとう火災や感電などにより、人身事故につながる場合があります危険です。ご使用前に、この「安全上の注意事項」をよくお読みになり、指示に従って正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、本機器を安全に正しくお使いいただき、ご利用者や、周りの方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 本機器の用途はあくまでも健康な方に対しておこなう美容行為です。健康を損なわれている、またはその可能性がある方へのご使用は絶対に行わないでください。



注意事項は、次のように区分されています。 **いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。**

	危険 ：人が死亡・または重症を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容
	警告 ：人が死亡・または重症を負う可能性が想定される内容。
	注意 ：人が障害を負う危険性、及び物的損害の発生等が想定される内容。
	左図記号は、禁止の行為を告げるものです。

		下記のような医用電子機器と併用しないでください。また、貴金属類・時計などは、必ず外してください。 ①ペースメーカー等の、体内埋込型医用電子機器。 ②人工心肺等の、生命維持用電子機器。 ③心電計等の、装着型の医用電子機器。
危険	禁止	次のような方は、ご使用をお避けください。 ①心臓疾患のある方。 ②妊娠中、もしくは妊娠している可能性がある方。 ③アルコールを帯びている方。

		次のような方は、必ず医師とご相談の上でご使用ください。 ・通院中の方。 ・急性疾患の方。 ・有熱性疾患の方（38℃以上）。 ・感染性疾患の方。 ・法定伝染病の方 ・結核性疾患の方。 ・悪性腫瘍のある方。 ・血液異常の方。 ・血友病患者の方。 ・肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方。 ・ステロイド系ホルモン剤を長期使用している方。 ・薬を服用している方。 ・アレルギー疾患の方。 ・激しく疲労している方。 ・18歳以下の方。 その他健康でない方・ご使用中に異常を感じた場合は、直ちにご使用をお止めください。
警告	禁止	次のような部位へのご使用は、お避けください。 ・粘膜の部位。 ・肛門や陰部。 ・月経時の部位。 ・整形手術をした部位。 ・目やその周り。 ・ヒザ・ヒジなどの関節。 ・傷口や、脱毛直後の部位。 ・知覚障害を起こしている部位。 ・アトピー・化粧品などで炎症を起こしている部位。 ・にきびや吹出物で炎症を起こしている部位。 ・物理的刺激などによる、厚みや火照り、慢性的シミのある部位。 ・金属・プラスチック・シリコンなどを、体内に埋め込んだる部位。

		本体、および付属品を勝手に修理・分解・改造しないでください。保証期間内であっても保守・修理を受けられない場合があります。 ▼作動不良を起こし、火災や火傷の原因となります。
警告	禁止	本来の目的や、用途以外には絶対にご使用にならないでください。 ▼事故や故障の原因となります。
		コードが壊れたり、本体に異常が発生した場合は直ちにご使用を中止し、必ず修理をご依頼ください。 ▼火災、火傷、事故の原因となります。
		他の電気製品との併用や、強い電波や磁気の発生する場所での保管は、避けてください。 ▼ノイズによる誤作動や、故障の原因となる事があります。
		トリートメント動作中に、ステンレスボード（小）を肌に当てず、そのまま放置しないでください。 ▼火災や、怪我の原因となります。
		揮発性の高いもの（ベンジン・シンナー・除光液）の近くでは、絶対にご使用にならないでください。 ▼爆発や、火災を引き起こす恐れがあります。
		ガス漏れに気付いた時には、直ちにご使用を中止し、排気をしてから電源を切り、速やかに電源コードを抜いてください。 ▼ガスに引火し、爆発や火災の原因になる事があります。
		雷が鳴り出したら、直ちにご使用を中止してください。 ▼落雷によって、電流が流れ、異常出力が発生する場合があります。
		高温になる場所や、湿気やホコリの多い場所、湯気の当たる場所でご使用、また放置しないでください。 ▼火災・感電の原因となる事があります。

		電源コードやボードのコードを抜く時は、濡れた手で持ったり、コードを強引に引っ張ったりしないでください。 ▼感電や、ショートして発火する事があります。
		電源コードが傷んでいたり、コンセントの差込みが緩い時は、ご使用にならないでください。また、タコ足配線はしないでください。 ▼感電や、ショートして発火する事があります。
		コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に捻じ曲げたり、引っ張ったり、束ねたり、タコ足配線はしないでください。 ▼感電や、火災の危険性があります。
		付属の電源コード以外は、ご使用にならないでください。 ▼火災・感電・故障の原因となります。
		本体や、操作パネルを濡らさないでください。 ▼万が一濡れてしまった時は、直ちにご使用を中止し、水分をよく拭き取ってください。
		ご使用時以外は、電源コードをコンセントから抜いてください。 ▼怪我や火傷、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

商品同梱物



TEPORA (テポラ) 本体 1台



コード連結ボックス 1個



ステンレスボード用コード 2本
AC アダプター




ステンレスボード用ネジ 5セット




ステンレスボード (大) 5枚
ステンレスボード (小) 1枚、ステンレスボード (小) 用タオルカバー

TEPORA（テポラ）本体 操作パネル各部名称

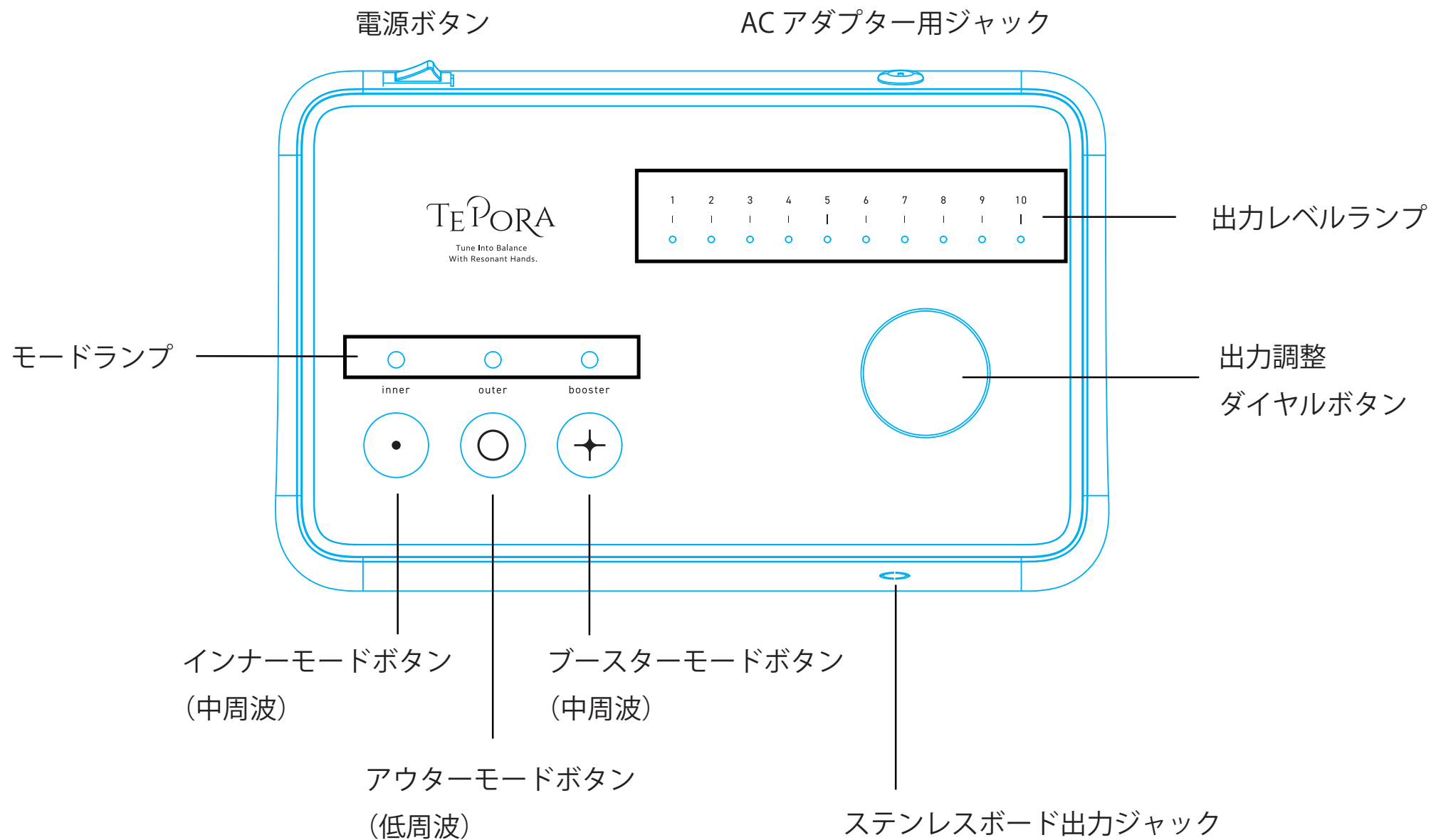


TEPORA（テポラ）の使い方

1

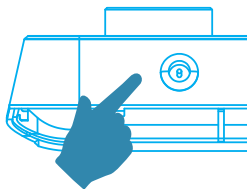


本体背面にある、AC アダプター用ジャックに、AC アダプターのプラグを差し込んでください。

ステンレスボードの取り付け方は、事項「ステンレスボードの取り付け方」を参照

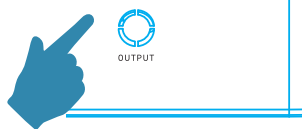

本体前面にある、ステンレスボード出力ジャックにプラグを差し込んでください。


2

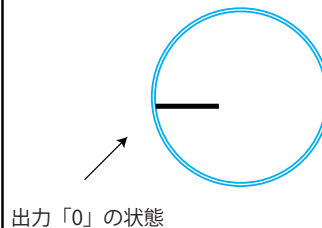

出力調整ダイヤルボタン上にあるラインがイラストのように、左横になるよう合わせてください。



その位置が出力レベル「0」になります。

3

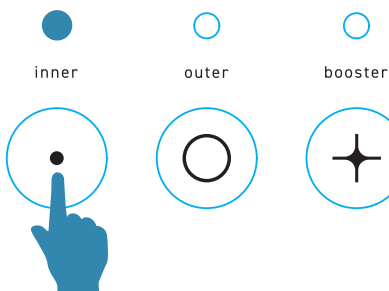


電源を ON にし、各モードスイッチを押すと、選択したボタンの上部にあるモードランプが点灯します。

3- 注意

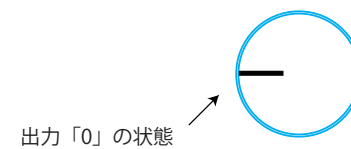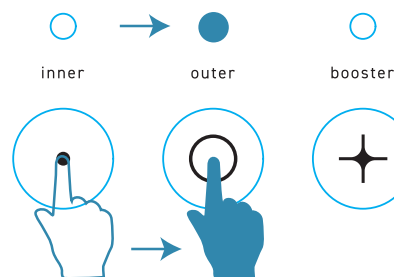

別のモードに切り替える際は、出力調整ダイヤルボタンを「0」の位置に戻してから、切り替えたいモードボタンを押してください。

4

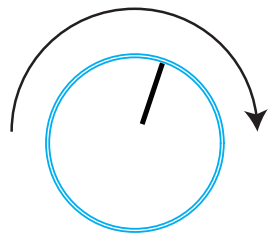


出力調整ダイヤルボタンを右に回すと、出力が大きくなります。必要な強さで施術してください。

モードにより最大レベルが異なります。
上限以上はいかないよう設定しています。

インナーモード・・・上限「4」
アウターモード・・・上限「10」
ブースターモード・・・上限「4」


5

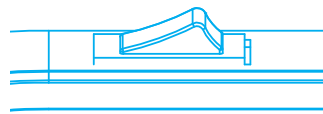


使用後は、電源ボタンを OFF にし、AC アダプターを抜いてください。

TEPORA（テポラ）の使い方 - ステンレスボードの取り付け方 -

TEPORA（テポラ）の使い方、
取り付け方は、動画でも配信中

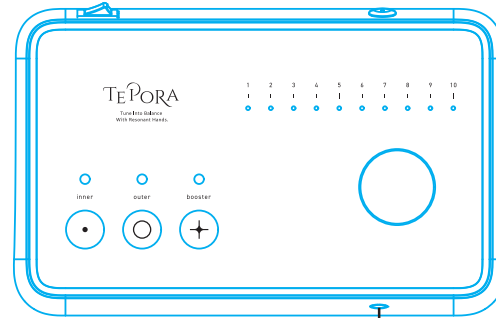

ステンレスボード（小）はクリップで挟み、専用の**タオルカバー**に入れて、施術を受ける人の手や体など肌に触れさせてください。

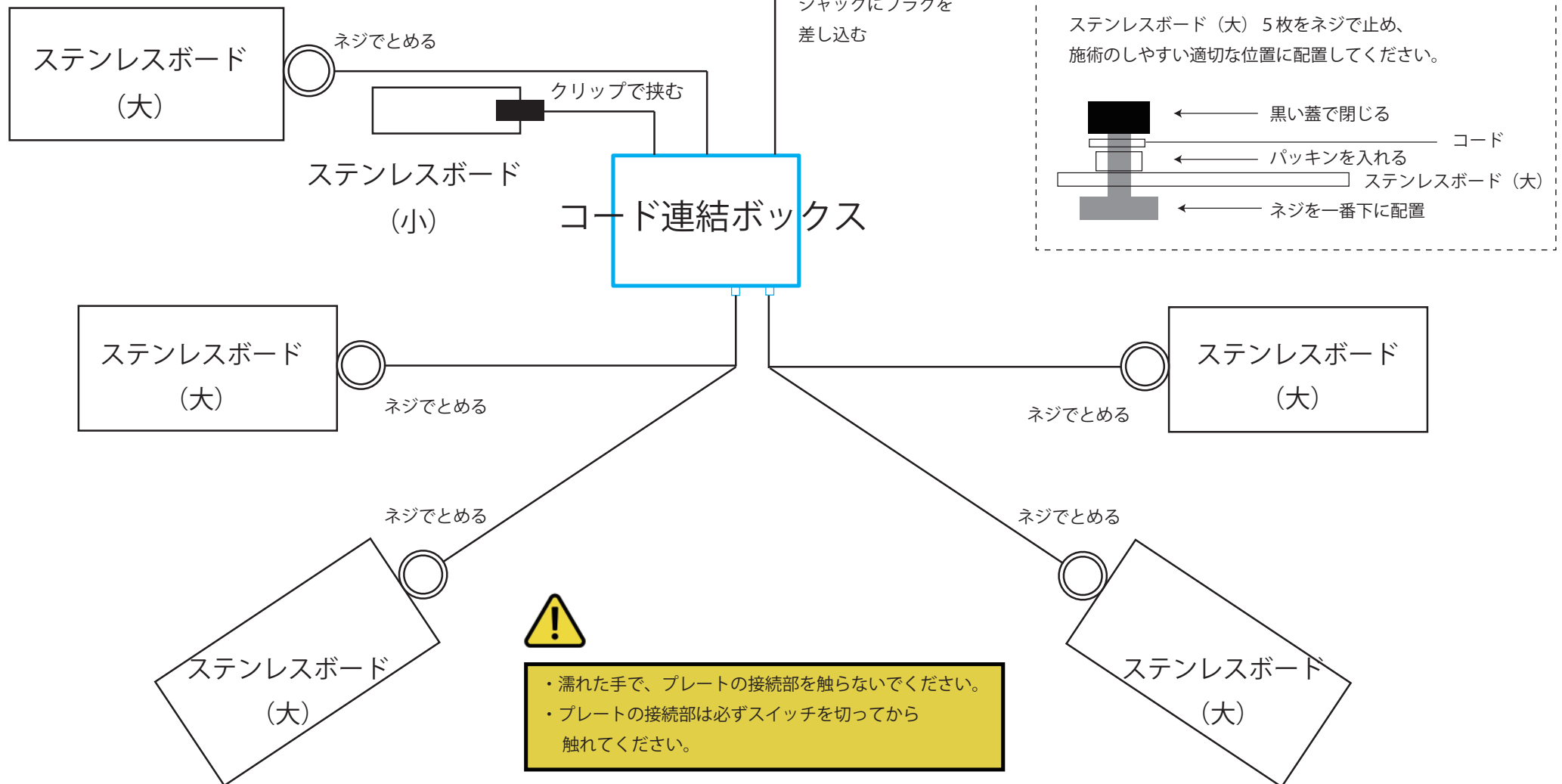

TEPORA（テポラ）の取り付け方・使い方 - 動画

TEPORA の取り付け方や使い方は動画でも解説しております。こちらの QR コードから視聴できます。



<内容>

- 第1章 TEPORA の設置方法
- 第2章 TEPORA の基本的な使い方
- 第3章 注意事項
- 第4章 施術事例



お手入れ方法、その他

ご使用後のお手入れに関して

(1) TEPORA（テポラ）本体

本体のお手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、硬く絞った布で汚れを拭き取ってください。

(2) ステンレスボード

表面に油分、指紋等がつくと通電が悪くなる場合があります。
台所用洗剤で落とした後、水で洗ってください。

長時間使用しない場合

接続されている全てのプラグ類を外し、箱やケースなどに入れ、常温保管をしてください。また、本体は精密機械のため、平坦な場所に置き、衝撃を与えないでください。



ご注意

お客様が本機を分解、改造された場合、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合がございます。

製品仕様

品名	TEPORA（テポラ）
型番	TPR-001
入力電圧	DC12V 2A
最大消費電力	5W
本体外形寸法	横 26cm× 奥行 16cm× 高さ 8cm
本体重量	1kg
本体材質	ABS 樹脂

アフターサービスに関して

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。
保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。
- 保証期間後の修理
お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認いただき、それでも異常のあるときは、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分での分解修理は絶対にしないでください。感電やけがの恐れがあります。

製品保証書、保証規定

《無料修理規定》

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④車両、船舶への搭載などで使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼することができない場合は、お問い合わせ窓口にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店またはお問い合わせ窓口にお問い合わせください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

保証書 持込修理

TEPORA (テポラ)		保証期間	お買い上げ年月日より1年間		保証対象	本体
★お客様	ご芳名		★お買い上げ年月日 年 月 日			
	ご住所 (〒)		住所・店名			
	お電話		電話			

Q&A

●ステンレスの踏み板は濡れても大丈夫ですか？

水がかかっても大丈夫です。接続部が水に浸ったままの場合は漏電の心配もありますので、必ず拭き取ってからご使用ください。また、接続部は電源を切ってから触ってください。

●ステンレスの踏み板はずっと踏んだままでも良いですか？

施術者の身体を通して微弱電流をお客様に流す仕組みのため、お客様のお身体に触れていない時は、必ず踏み板から足を外してください。お客様に触ってから踏み板にのる、または踏み板から足を外してから手を離すことを基本の動作としてください。

●電源を入れたまま、機器を移動させても良いですか？

必ず電源を切ってから機器の移動や、接続部の取り外しを行ってください。

●アクセサリは付けたままで大丈夫ですか？

時計や貴金属のアクセサリは全て外していただくことをおすすめしております。

お問い合わせ

販売元 株式会社ビーエイチ

〒321-0973 栃木県宇都宮市岩曾町 805-3



お電話でのお問い合わせ
(平日9:00~17:30)

028-656-9171



メールでのお問い合わせ

info@b-h.co.jp